

## 長期間医院を休業する場合の无影灯の角度



# 長期間医院を休業する場合のイスのポジション

## イスの上下の位置を下にしてください



ジャバラ部分が伸びないようにする  
イスの位置を上固定するとジャバラが  
伸びてしまう可能性があります。

## 長期間医院を休んでいた場合の開始後のお手入れについて

- 電源投入後、スピットンの水を30秒ほど流し、そのあとコップの水を
- 10回ほど、流してコップ給水タンクの水を入れ替えます。
- シリンジ、タービン、モーターホースの中の水回路を清掃する意味で
- 水を全開の位置で30秒位出しっぱなしにします。(一本一本個々に)
- パージ機能付ユニットはパージを実施して下さい。
- 念のため、タービン、コントラの注油をしてから回し後使用する。