

XG3Dご利用のお客様へ Ver3.0

(2015年3月以降ご納品のお客様)



1、子機パソコンの電源を切る

通常どおり、診療室／カウンセリング室等の子機の電源を切ります。

2、NASの電源を切る方法

その1、RCUデスクトップ右端にある「NASへの接続」アイコンをダブルクリックし、黒いデスクトップを表示します。



その2、黒いデスクトップ左端にある「シャットダウンの実行」をダブルクリックします。

これでNASがシャットダウンします。



3、RCUの電源を切る

通常どおり、バックアップツールを実行しシャットダウンします。

4、EXTHDDの電源を切る

装置背面にある電源スイッチ「O」を押します。



5、UPSの電源を切る

装置全面にあるカバーを上げて、電源ボタンを押します。



XG3Dご利用のお客様へ Ver3.0

(2015年3月以降ご納品のお客様)

sirona.
The Dental Company

電源を入れる方法

1、UPSの電源を入れる

装置全面にあるカバーを上げて、電源ボタンを押します。



2、EXTHDDの電源を入れる

装置背面にある電源スイッチ「I」を押します。



3、NASの電源を入れる

装置の角にある電源ボタンを押します



4、RCUの電源を入れる

通常どおり、RCUが起動したら、子機の電源を順次いれてください。