

1、パソコンの電源を切る方法

その1、診療室／カウンセリングの子機の電源を切る

その2、RCU(赤い画面のパソコン)の電源を切る

その3、サーバー(XSV:青色／グレー画面のパソコン)の電源を切る


2、ストレージの電源を切る方法

2台同時に、左上の電源ボタンを3～4秒程長く押し続けます

電源ボタンが点滅
約3分程で
電源が切れます




3、UPS電源を切る方法

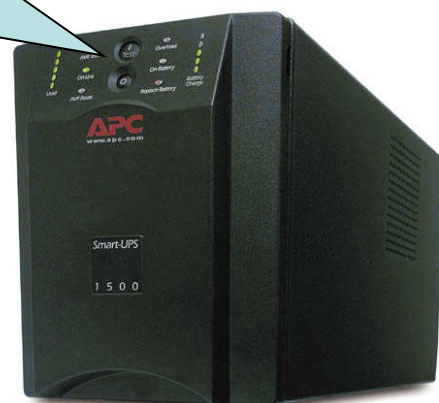

停電が終わったら

1、UPSの電源を入れる

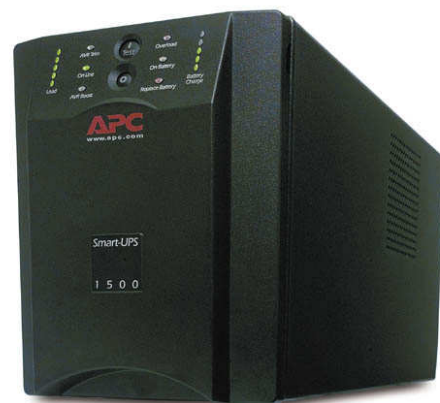

2、ストレージの電源を入れる

2台同時に電源ボタンを押す

ON



注意: 正常に機能するまで、約5分程かかります
電源ボタンのランプが点滅から点灯になるまでお待ちください

3、パソコンの電源を入れる

その1、サーバーの電源を入れる

その2、RCU(赤い画面のパソコン)の電源を入れる

その3、子機クライアントの電源を入れる